

# 基本操作

## 一 设备连接

本设备需要和伤口敷料套件和集液瓶套件一起配合来使用，建议选用本公司推荐配件，也可以选用相同规格参数的其他厂商生产的配件。



图1

### 集液瓶卡环安装(如图1)

卡环用于固定集液瓶，安装时必须首先安装卡环。

双手握住卡环缺口处，对准设备缺口垂直将卡环沿设备右侧的装配插槽插入，使卡环与设备连接稳固。



图2

### 集液瓶安装(如图2)

卡环安装完毕后就可以安装集液瓶，安装步骤如下：

将液瓶放入卡环中，左右转动集液瓶确保集液瓶放置平稳。

转动集液瓶，使集液瓶上负压口靠近设备负压转接头，使集液瓶上引流端口向外。

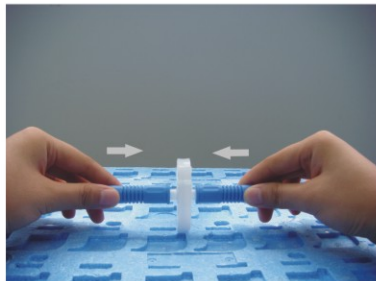


图3

### 负压导管及细菌过滤器安装

负压导管内径 $\phi 6\text{mm}$  x 外径 $\phi 9\text{mm}$

将两条长约10cm的负压导管，分别连接到细菌过滤器两端(如图3)；

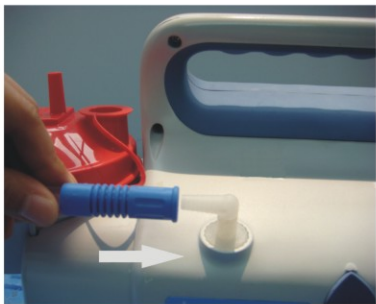


图4

将细菌过滤器两端连接的负压导管一端连接到设备负压转接口(如图4)。



图5

另一端连接到集液瓶负压端口即可(如图5)。



图6

### 引流导管安装

使用伤口敷料正确地填充和密封伤口；  
伤口敷料接触好密封后，将引流导管另一端插入集液瓶负压引流端即可(如图7)。  
引流导管长度依据实际情况而定，引流导管不能出现打结、堵塞等情况。

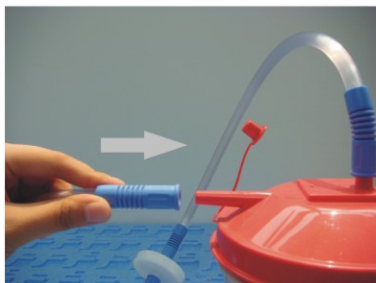


图7

**集液瓶、负压导管和过滤器及引流管更换步骤如下：****集液瓶安装更换步骤：**

- (1) 关闭设备；
- (2) 确保引流管中的渗出液全部流入集液瓶，拔掉集液瓶是哪个连接到伤口敷料端的引流导管，盖紧集液瓶的引流端口的小盖。
- (3) 从集液瓶上拔掉连接集液瓶和过滤器之间的引流导管；
- (4) 将集液瓶从设备卡环中取出；
- (5) 处理集液瓶和连接导管（一次性使用）。



集液瓶属于一次性耗材，不可重复使用，建议集液瓶应至少一周更换一次。建议选用透明材料制成的集液瓶产品。

**负压导管及细菌过滤器的安装更换步骤：**

- (1) 关闭设备，停止治疗工作；
- (2) 拔掉细菌过滤器两端的导管，按照相同方法将新的细菌过滤器接入。



细菌过滤器属于一次性耗材，不可重复使用，建议连续使用24小时更换一次。

**引流导管更换步骤：**

- (1) 关闭设备，待压力恢复至常压；
- (2) 首先拆除伤口处引流导管，确保引流导管中剩余渗出液回流至集液瓶；
- (3) 拔掉集液瓶上负压引流导管，
- (4) 使用新的引流导管与伤口敷料接触好密封，将引流管另一端插入集液瓶负压引流端口即可。



伤口渗出液属于医疗废液，更换后的集液瓶、引流管、细菌过滤器均属于医疗垃圾，请勿随意丢弃，按照医疗垃圾分类后交专业机构处理。

惠州市医疗电子有限公司

地址:广东省惠州市东江高科技产业园上霞北路1号

电话:+86-752-5300546

传真:+86-752-5300666

邮箱:info@ForyouNPWT.com

网址:www. ForyouNPWT. com